

### Инструкция по добавлению методики измерения (аналита) в анализатор иммунохемилюминисцентный PATHFAST™

Для добавления методики измерения (аналита) в анализатор иммунохемилюминисцентный PATHFAST™ необходимо следовать пункту 11.5.2.«Добавление аналита» стр. 130 Руководства по эксплуатации. Содержание данного пункта приведено ниже.


В окне Добавление аналита [NEW REGISTRATION] можно добавить параметры для тестирования без полного обновления программы.

Для этого необходимо использовать карточку ввода нового параметра [ITEM PARAMETER DATA SHEET] и ручной сканер штрих-кодов.


Рис.1 Карточка ввода нового параметра

При появлении новых реагентов появляются соответствующие им карточки. Для ввода новой методики (аналита) в анализатор необходимо:


- Из главного окна перейдите на вкладку «АДМИН.»[ADMIN].

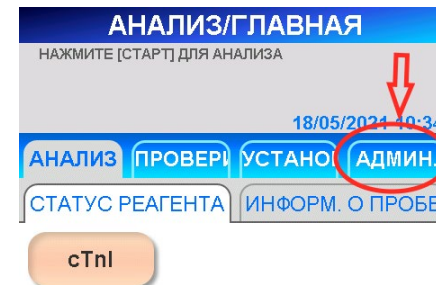


- На открывшейся вкладке выберите пункт «ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР» [FILE UTILITY] и дождитесь его загрузки.

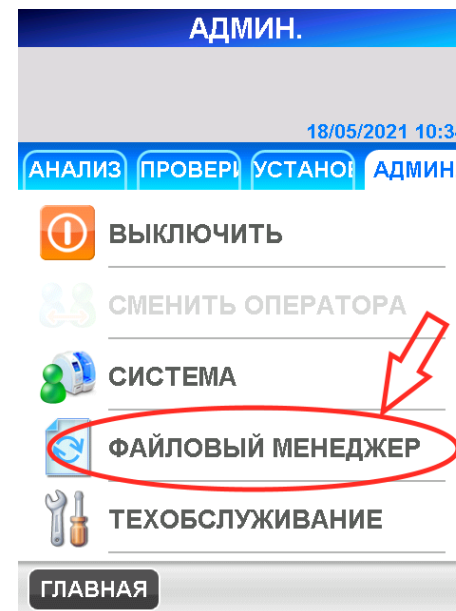


3. В открывшемся окне Файлового менеджера[FILE UTILITY] выберите «НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ» [NEW REGISTRATION].

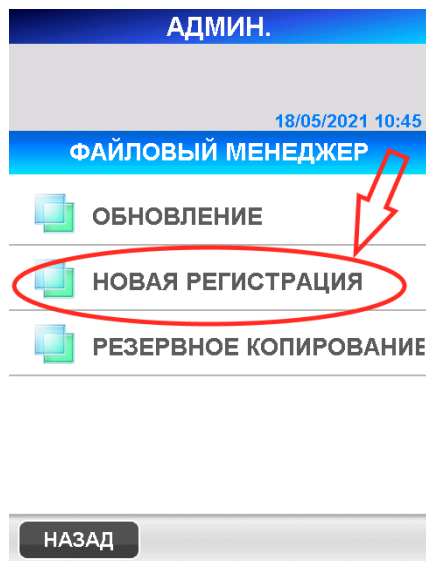


4. Будет выведено следующее окно с сообщением: «После обработки новой регистрации систему следует перезагрузить. Хотите продолжить?». На данный вопрос необходимо нажать «ОК».

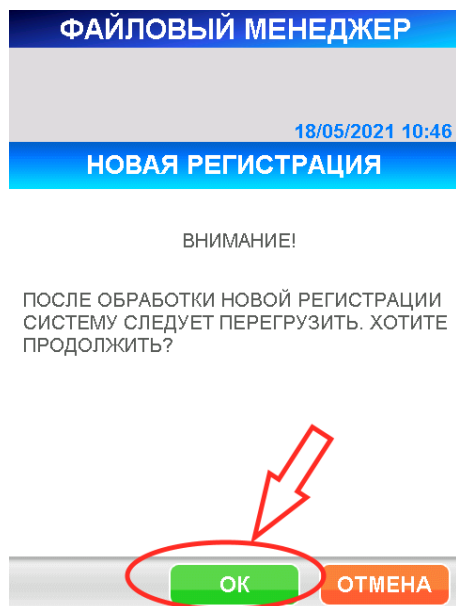


5. Выберите Добавление нового параметра [ADDING ITEM PARAMETERS] в окне «Новая регистрация» [NEW REGISTRATION].

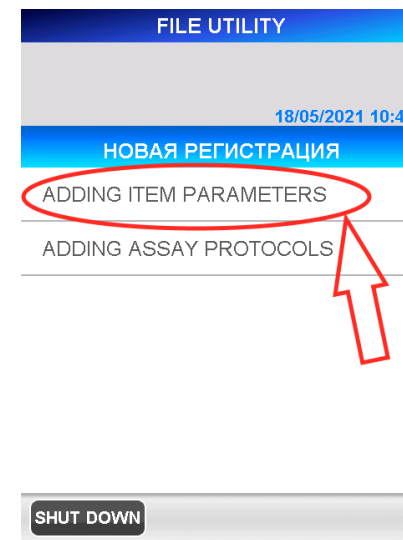

6. При этом на дисплей будет выведено следующее окно с сообщением: «ADDING ITEM PARAMETERS» о необходимости ввести штрих-коды с карточки ввода нового реагента.

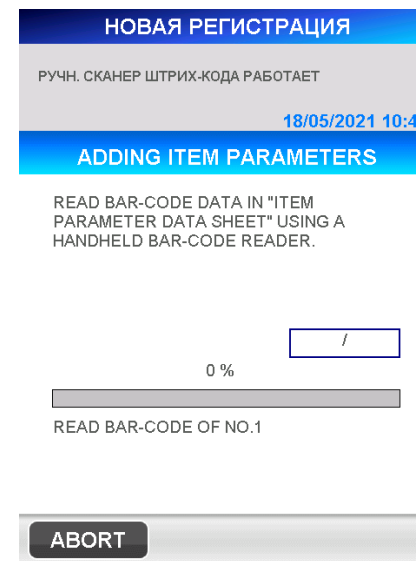


7. На данном этапе необходимо выяснить какая именно версия прибора находится перед Вами. Для этого нужно посмотреть на обратную сторону прибора и найти наклейку-шильдик с серийным номером анализатора:

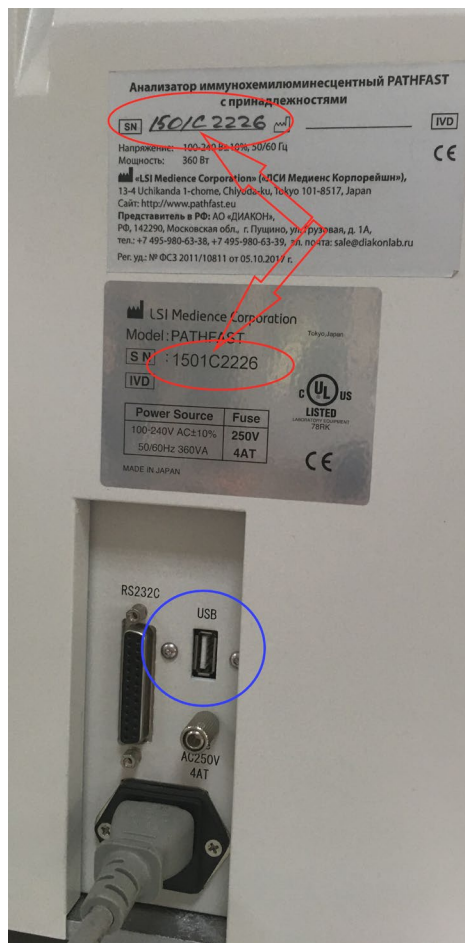


8. На данной наклейке будет указан серийный номер в формате «0000X1111». Буква в центре соответствует версии Вашего анализатора. Версии бывают: «А», «В», «С», «D». Соответственно необходимо выбрать (или распечатать) ту карточку ввода нового реагента, которая соответствует Вашей версии прибора. Для анализатора версии Type-D на карточке будет 9 штрих-кодов, а для версии Type A/B/C - 6 штрих-кодов.

9.

10. Считайте штрих-коды с параметрической карточки с помощью ручного сканера штрих-кодов в порядке возрастания порядкового номера. После каждого считывания анализатор покажет процент завершения операции и количество уже считанных штрих-кодов:

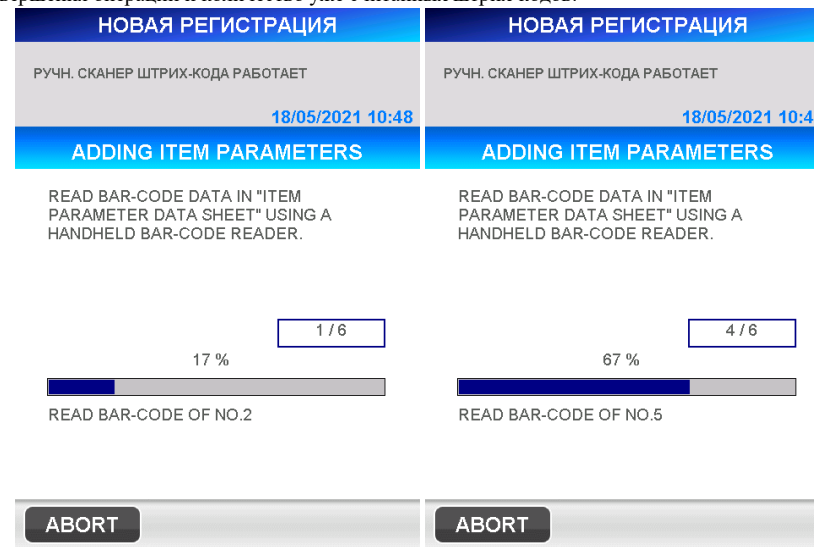


11. Следуйте инструкциям по обращению с параметрической карточкой и сканером штрих-кодов на дисплее.
12. По факту завершения считывания, при удачном вводе верных штрих-кодов будет выведено окно с просьбой подтверждения введенной информации. Необходимо нажать клавишу «OK» для подтверждения или клавишу «CANCEL» для отмены операции:

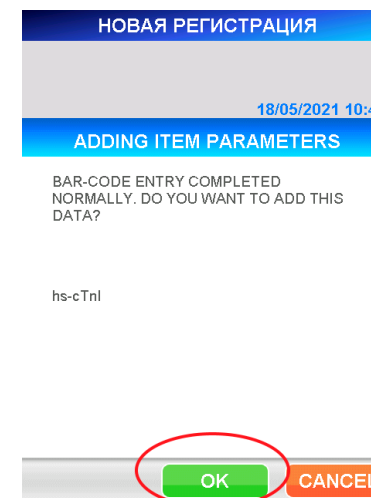


## PF1221-K PCT

13. После этого необходимо перезагрузить прибор, для чего необходимо выбрать Выключение прибора [SHOOT DOWN] в открывшемся окне и, следуя инструкциям на экране, отключить прибор.

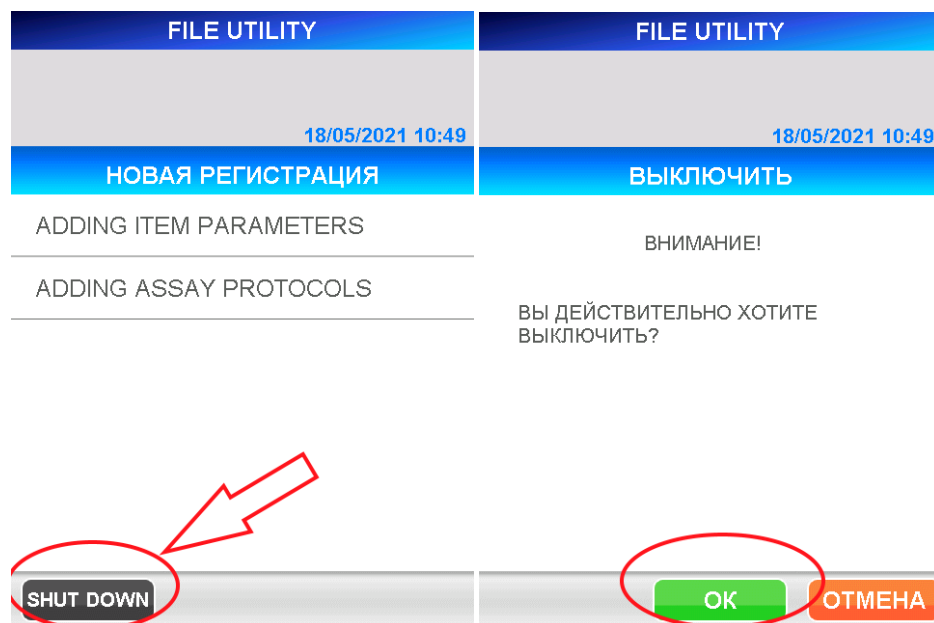

14. Далее прибор необходимо снова включить и провести проверку ввода новой методики (аналита). Дождитесь загрузки анализатора и перейдите на вкладку «АНАЛИЗ», где выберите пункт меню «ВВОД МС»

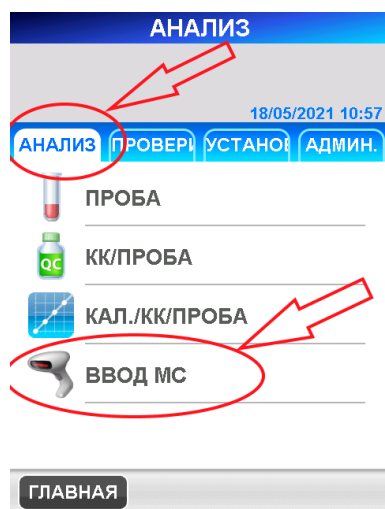

15. В открывшемся окне найдите кнопку «ПЕЧАТЬ», нажатие которой запустит процесс печати встроенным термопринтером анализатора полный перечень методик (аналитов), имеющихся в памяти анализатора. Все методики будут напечатаны в порядке соответствующим их номеру:

DATE: 17/05/2021 16:04  
 INSTRUMENT SERIAL: 1307C1920  
 OPERATOR ID: System  
 PROGRAM VERSION: 3.0.3.2

### Registered item

1	cTnI	003101
2	Myo	911262
3	CK-MB	911262
4		
5	D-Dimer	911262
6	NTproBNP	911262
7	hsCRP	911263
8		
9	HCG	805212
10	cTnI-II	109203
11	Myo-II	911262
12	CK-MB-II	911262
13	HCG preg	003311
14	LH	003311
15	FSH	003311
16	PRL	003311
17	E2	003101
18	PROG	912221
19	TES	103291
20	P-SEP	011221
21		
22		
23		
24	hs-cTnI	709261

Далее Приведены карточки штрих-кодов для ввода нового параметра PCT для анализатора версии Type-D (9 штрих-кодов) и версии Type A/B/C (6 штрих-кодов).

[ BAR-CODE SHEET FOR NEW ENTRY (for Type-A/B/C) ]

# PATHFAST™ B·R·A·H·M·S PCT

## ITEM No:22

Item Parameter Ver : 12290221101

①



②



③



④



⑤



⑥



[ BAR-CODE SHEET FOR NEW ENTRY (for Type-D) ]

# PATHFAST™ B·R·A·H·M·S PCT


## ITEM No:22

Item Parameter Ver : 12290221101

①




②

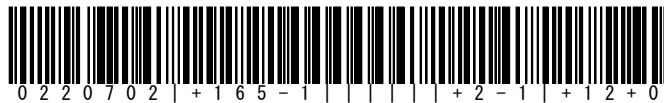

③



④

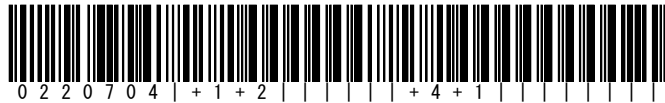

[ BAR-CODE SHEET FOR NEW ENTRY (for Type-D) ]

# PATHFAST™ B·R·A·H·M·S PCT

## ITEM No:22

Item Parameter Ver : 12290221101

5



6



7

