

Рис.1. Результат проведения непрямого антиглобулинового теста Кумбса в пробирках (положительная реакция). Тест проведен с использованием 5% суспензии Тест-эритроцитов I (вариант исполнения №6) и сыворотки пациента, содержащей анти-DiGg антиэритроцитарные антитела.

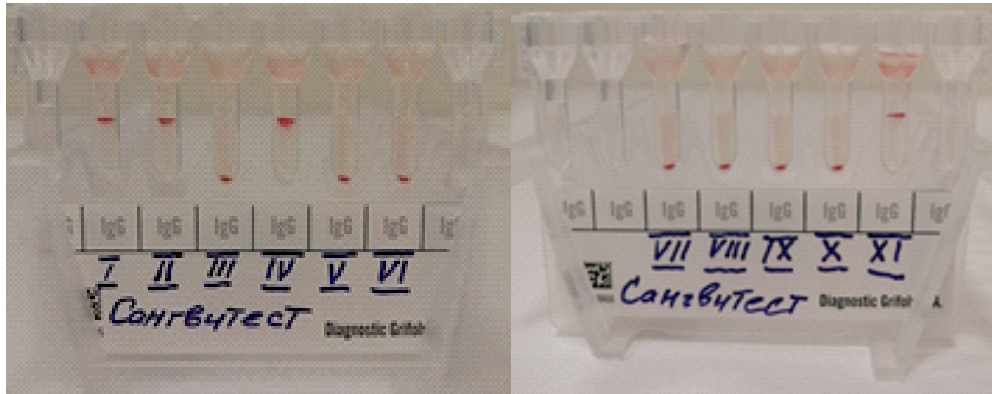


Рис.2. Результаты гелевого теста с использованием Тест-эритроцитов I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI (0,8% суспензии, вариант исполнения №7) и сыворотки пациента, содержащей анти -DiGg антиэритроцитарные антитела.



Рис.3. Сравнительный гелевый тест с использованием тест-эритроцитов из панели варианта исполнения №7 производства ООО «Сангвитест» и ID-Dia Panel производства BioRad:
 - микропробирки №2, 3, 4 – Тест-эритроциты I, II, III из варианта исполнения №7 производства ООО «Сангвитест»;
 - микропробирки №5, 6, 7 - Тест-эритроциты I, II, III из ID-Dia Panel производства BioRad.
 Анализируемый образец: сыворотка пациента, содержащая анти-DiGg антиэритроцитарные антитела.